

1. Złóż ładowarkę i podłącz do prądu

- kabel USB podepnij do urządzenia ładującego
- gniazdo USB znajdziesz z boku ładowarki



2. Połóż opaskę na ładowarce

- kropka na spodzie opaski powinna trafić na kropkę na ładowarce indukcyjnej



3. Ładowanie

- po 30 sekundach **Przycisk SOS** na opasce podświetli się kolorem zielonym i czerwonym
- opaska będzie w pełni naładowana po ok. 3 godzinach
- jeśli po 30 sekundach na opasce nie zaświeci się żadna dioda sprawdź ułożenie opaski na ładowarce
- jeśli na opasce nie świeci się żadna dioda odczekaj około 20 minut i wciśnij **przycisk SOS**- opaska powinna się uruchomić



4. Opaska naładowana

- opaska poinformuje o pełnym naładowaniu baterii komunikatem głosowym "bateria naładowana"
- **przycisk SOS** zaświeci się cały na zielono



5. Opaska gotowa do nałożenia

- zdejmij opaskę z ładowarki, opaska jest gotowa do założenia na rękę
- jeśli opaska jest bardzo ciepła odczekaj chwilę przed jej założeniem

Przed telefonem do SiDLY użytkownik może we własnym zakresie:
 - sprawdzić czystość sensorów • podłączyć ładowarkę • wciśnąć przycisk sos
 Obsługa klienta: **+48 222 437 737** | helpdesk@sidly.org | godziny pracy 9:00-17:00

 **sprawdź 2 stronę**

Wzywanie pomocy

Drogi użytkowniku, jeśli:



Czujesz się źle



Potrzebujesz pomocy

Jesteś w
niebezpieczeństwie**WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ przycisk SOS**

Co się wydarzy?

1. Usłyszysz komunikat głosowy „wysyłanie wiadomości SOS”.
2. Zapali się czerwona dioda.
3. Nastąpi połączenie głosowe z ratownikiem z Telecentrum Sidly.

Jeśli nie usłyszałeś komunikatu „wysyłanie wiadomości SOS”
i nie widzisz czerwonej diody - jeszcze raz **PRZYCIŚNIJ**
i **PRZYTRZYMAJ przycisk SOS**.

Przycisk
SOS

**Pamiętaj: opaskę nosimy na nadgarstku cały czas.
Zdejmujemy ją tylko na czas kąpieli oraz by ją naładować.**

Sygnały świetlne i dźwiękowe opaski

**Pamiętaj, że opaska generuje sygnały świetlne i dźwiękowe, które
wskazują jej aktywność:**

- — — — — migająca zielona dioda oznacza poprawną pracę urządzenia
- — — — — migająca czerwona dioda oznacza niskim poziom naładowania baterii w opasce
- — — — — ciągła czerwona dioda pojawia się w momencie naciśnięcia przycisku SOS

Odbieranie połączeń na opasce

Gdy z urządzenia zacznie wydobywać się sygnał melodii oraz dioda sygnalizuje kolor biały, oznacza to próbę połączenia ze strony Telecentrum Sidly.

Aby odebrać połączenie należy **przytrzymać przycisk SOS** do czasu aż melodia przestanie grać i rozpocznie się rozmowa.

Przed telefonem do SIDLY użytkownik może we własnym zakresie:
• sprawdzić czystość sensorów • podłączyć ładowarkę • wcisnąć przycisk sos
Obsługa Klienta: +48 222 437 737 | helpdesk@sidly.org | godziny pracy 9:00-17:00



sprawitz 2 stronę